

COLDISEPT



NANO SILVER

Fülcsepp



Orvostechikai eszköz, amely támogatja a külső hallójárat baktériumok és gombák okozta gyulladásának kezelését.

COLDISEPT NANO SILVER fülcsepp a külső hallójárat felületét megpuhítja és eltávolítja a szennyező anyagokat, továbbá védőréteget képez a bőr felszínén. A termék ezüstkolloid és rézkolloid tartalma csökkenti a baktériumok és a gombák szaporodását. A COLDISEPT NANO SILVER fülcsepp támogatja a külső fül különböző eredetű gyulladásának kezelését.

15 ml

ÖSSZETÉTEL:

tisztított víz, glicerín, propilénglikol, ezüstkolloid, rézkolloid.

MELLÉKHATÁSOK:

COLDISEPT NANO SILVER fülcsepp mellékhatásai nem ismertek, különösen érzékeny személyeknél allergiás tünetek megjelenése nem kizárt. Amennyiben az allergia tünetei megjelennek, azonnal hagyja abba a termék használatát.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ne használja a terméket, ha allergiás a termék valamely összetevőjére.

Ne használja a terméket, ha lyukas a dobhártyája.

Ne helyezze az adagolót a füljáratban túl mélyre.

Kerülje a termék véletlen érintkezését a szemmel, illetve a szájjal.

Azonnal abba kell hagyni a termék alkalmazását, amennyiben valamilyen nemkívánt reakció lépne fel.

Ne használja a lejáratú idő után.

Terhesség ideje alatt, illetve 6 év alatti gyermekek esetében csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

Az orvostechnikai eszköz rendeltetésszerű alkalmazás során történő súlyos, váratlan esemény jelentése kötelező a gyártó és a felhasználó lakhelye szerinti kompetens hatóság felé, Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.

TÁROLÁS

25°C alatt, száraz helyen, gyermekek elől elzárva tartandó!

FELHASZNÁLÁS ÉS ADAGOLÁS

A COLDISEPT NANO SILVER fülcseppet használja naponta 3-szor és a gyulladás tüneteinek megszűnése után még legalább 3 napig.

1. Használat előtt kezeiben melegítse fel a készítményt.
2. Feküdjön oldalra úgy, hogy a kezelendő füle felfelé nézzen.
3. Cseppentsen a fülbe 5 cseppet (amennyiben orvosa mást nem javasolt) és maradjon ebben a helyzetben legalább 3-5 percig.

Használja rendszeresen, egyéni igény szerint.

GRAFIKUS SZIMBÓLUMOK:

	Gyártási szám
	Lejárat napja: YYYYMM
	Olvassa el a használati útmutatót.
	Gyártás időpontja
	Gyártó
	Megengedett hőmérséklet

Használati utasítás kiadása: 01.09.2020