

COLDISEPT

NANO SILVER

Orrspray

HU



Orvostechnikai eszköz, amely orrspray formában csökkenti az orr nyálkahártya szárazságának vagy irritáltságának az érzését, miközben véd a veszélyes, külső hatások ellen. A COLDISEPT nanoSILVER orrspray hidratálja és nyugtatja az irritált orrnyálkahártyát, miközben segíti a regenerációt és csökkenti az égő érzést.

Az ezüstkolloid nagyon erős bakteriális hatású. A termék ezüst nanorészecskéket tartalmaz, amelyek csökkentik a baktériumok növekedését.

A termék további sajátosságait az ásványi anyagok, valamint a növényi kivonat hatásai adják. 20 ml

ÖSSZETÉTEL

Tisztított víz, ezüstkolloid, *Chondrus crispus* – ir tengeri alga (karragén) kivonat, szorbit, glicerin, ásványi sók [kálium-dihidrogén-foszfát, kálium-klorid-hexahidrát, magnézium-klorid-hexahidrát], nátrium-benzoát, citromsav.

JAVALLATOK

Használja száraz és irritált orrjáratok esetében.

Használata különösen ajánlott:

- atrófiás rhinitis,
- fertőzőes vagy allergiás rhinitis,
- gyógyszereszedéskor, amelyek az orrnyálkahártya hám rétegét károsítják
- sinusitis,
- levegő vagy porszenyezés,
- extrém hőmérsékletek,
- idősebb szeméyek,
- a központi fűtés vagy a légkondicionáló okozta orr nyálkahártya kiszáradása,
- dohányzás esetén

MELLÉKHATÁSOK

COLDISEPT nanoSILVER orrspray mellékhatásai nem ismertek, különösen érzékeny személyeknél allergiás tünetek megjelenése nem kizárt. Amennyiben allergiás reakció jelentkezne, hagyja abba a termék további alkalmazását.

EGYEB INFORMÁCIÓK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Ne használja a terméket, ha allergiás a termék valamely összetevőjére.

Ne használja a terméket, ha allergiás az ezüstre.

Kerülni kell a termék véletlen érintkezést a szemekkel.

Azonnal abba kell hagyni a termék használatát, ha valamilyen nem kívánt reakció lépne fel.

Ne használja a lejáratú idő után.

Szenyezetttség esetén távolítsa el az applikátort, mossa meg és forrázza le, vagy alaposan mossa meg forró vízzel.

Terhesség ideje alatt, illetve 6 év alatti gyermekek esetében csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

A termék hosszú ideig használható a hozzászokás rizikója, mellékhatások vagy egyéb komplikációk nélkül.

Az orvostechnikai eszköz rendeltetésszerű alkalmazás során történő súlyos, váratlan esemény jelentése kötelező a gyártó és a felhasználó lakhelye szerinti kompetens hatóság felé. Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet-nek.

TÁROLÁS

25 °C alatt, száraz helyen gyermekek elől elzárva tartandó!

FELHASZNÁLÁS ÉS ADAGOLÁS

Használja naponta 3-4 alkalommal, egyéni igény szerint.

1. Az első használat előtt párszor nyomja meg az adagoló pumpát.

2. Helyezze az applikátort az orrlyukba.

3. Alkalmazzon egy-két adagot mindkét orrlyukba.

Grafikus szimbólumok:

	Gyártási szám		Olvassa el a használati útmutatót.		Gyártó
	Lejárat napja: YYYYMM		Gyártás időpontja		Megengedett hőmérséklet

Használati utasítás kiadása: 01.09.2020

Gyártó:
**ARKONA Fogászati Farmakológiai
Laboratórium, Nasutów 99C,
21-025 Niemce, Lengyelország**

Gyártva
az EU-ban:
**Alpen Pharma AG,
Bern, Svájc részére**

