

COLDISEPT

NANO SILVER

Torokspray

HU



Orvostechnikai eszköz, amely spray formában támogatja a baktériumok és vírusok okozta torokgyulladás kezelését.

A COLDISEPT nanoSILVER torokspray védőréteget képez a torok nyálkahártyáján, és véd a fizikai, kémiai és biológiai hatások (vírusok, baktériumok) ellen.

A COLDISEPT nanoSILVER torokspray hidratálja a torok kiszáradt nyálkahártyáját, ezáltal segít megszüntetni az állandó kellemetlen érzést és érezhetően csökkenti a gyulladás tüneteit, mint a fájdalom és égő érzés.

A spray egy gél réteget képez, amely védi a száj és torok nyálkahártyáját a baktériumok és a vírusok ellen.

A termékben található nátrium-, kálium-, kalcium- és magnézium-ásványi sók vizes oldata tisztítja a torkot, csökkenti a torok és az ornyálkahártya duzzanatát és segíti az irritált nyálkahártya regenerálódását.

A termék ezüstkolloidot (ezüst nanorészecskék) tartalmaz, amely csökkenti a baktériumok szaporodását. A borsmenta olaj segít megtisztítani orrjáratokat, enyhíti a köhögést és javítja a légzési komfortot.

20 ml

ÖSSZETEVŐK

Tisztított víz, ezüstkolloid, *Chondrus crispus* - ir tengeri alga (karragén) kivonat, szorbit, glicerín, ásványi sók (kálium-dihidrogén-foszfát, kálium-klorid-hexahidrát, magnézium-klorid-hexahidrát), borsmenta olaj, nátrium-benzoát, citromsav.

JAVALLATOK

A COLDISEPT nanoSILVER torokspray hatékonyan támogatja:

- a száj és torok nyálkahártya gyulladás,
- a mandulagyulladás,
- a mandulák eltávolítása utáni állapot kezelését.

MELLÉKHATÁSOK

A COLDISEPT nanoSILVER torokspray mellékhatásai nem ismertek, különösen érzékeny személyeknél allergiás tünetek megjelenése nem kizárt. Amennyiben allergiás reakció jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék további alkalmazását.

EGYÉB INFORMÁCIÓK ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Ne használja a terméket, ha allergiás a termék valamely összetevőjére.

Ne használja a terméket, ha allergiás az ezüstre.

Kerülni kell a termék véletlen érintkezést a szemekkel.

Azonnal abba kell hagyni a termék használatát, ha valamilyen nem kívánt reakció lépne fel.

Ne használja a lejáratú idő után.

Terhesség ideje alatt, illetve 6 év alatti gyermekek esetében csak orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

A termék hosszú ideig használható a hozzászokás rizikója, mellékhatások vagy egyéb komplikációk nélkül.

Az orvostechnikai eszköz rendeltetésszerű alkalmazás során történő súlyos, váratlan esemény jelentése kötelező a gyártó és a felhasználó lakhelye szerinti kompetens hatóság felé, Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet-nek.

TÁROLÁS

25 °C alatt, száraz helyen, gyermekek elől elzárva tartandó!

FELHASZNÁLÁS ÉS ADAGOLÁS

Használja a terméket naponta 3-4-szer, az egyéni igénynek megfelelően.

1. Az első használat előtt néhányszor nyomja meg a szórófejet.

2. Helyezze az applikátort a szájba a torok irányába.

3. Permetezzen 3-4 adagot a pumpa megnyomásával a szájába.

Grafikus szimbólumok:

	Gyártási szám		Olvassa el a használati útmutatót.		Gyártó
	Lejárat napja: YYYYMM		Gyártás időpontja		Megengedett hőmérséklet

Használati utasítás kiadása: 01.09.2020

Gyártó:
ARKONA Fogászati Farmakológiai Laboratórium, Nasutów 99C,
21-025 Niemce, Lengyelország

Gyártva
az EU-ban:
Alpen Pharma AG,
Bern, Svájc részére

